

Effets Visibles et Durables après Seulement Quelques Séances

Il est maintenant possible de vous occuper de votre peau sans la soumettre à des traumatismes ou à de longs traitements invasifs. La lumière pulsée génère un effet lifting en stimulant naturellement la production de collagène et en améliorant la tonicité et la luminosité de la peau. Pareillement, Minisilk FT est efficace pour traiter des lésions vasculaires superficielles et des imperfections de la peau liées à l'âge et à l'exposition au soleil et pour l'épilation progressive des poils superflus. Les avantages sont déjà évidents après seulement quelques séances.

DEKA

The Code of Excellence

Lumière Pulsée DEKA: la Dernière Frontière dans les Traitements de la Peau

MINISILK FT

**MÉDECINE ET ESTHÉTIQUE**

**Éliminez les Poils Superflus sans
Devenir Esclave des Crèmes et des
Cires d'Épilation**

DEKA

The Code of Excellence

Données et contacts

DEKA M.E.L.A. s.r.l.
Via Baldanzese,17
50041 Calenzano (FI) - Italy
Tel. +39 055 8874942
Fax +39 055 8832884
info@dekalaser.com
www.dekalaser.com

Filiale en France:
DEKA Technologies Laser
99, Cours Gambetta - 69 003 LYON
Tél: +33 4 78 62 71 48 - Fax: +33 4 78 62 66 37
info@deka.fr - www.deka.fr

© DEKA 004-0149-10-030 Rev.1.0

Puissance et impulsion fractionnée: la juste technologie pour chaque phototype

LUMIÈRE PULSÉE POUR TOUS VOS BESOINS

De l'épilation au rajeunissement vasculaire et pigmentaire: la réponse de DEKA à toutes les imperfections de la peau est basée sur des technologies avancées de haute performance et toujours dans un cadre de complète sûreté, sans aucun dommage thermique aux zones avoisinantes.

IMPULSION FRACTIONNÉE: VITESSE ET EFFICACITÉ POUR CHAQUE TYPE DE PEAU

La sélection de la gamme de longueur d'onde la mieux adaptée au phototype et à l'application garantit une plus grande absorption de lumière par la mélanine dans le poil ou les taches sur la peau, même pour des phototypes plus foncés.

L'énergie bénéfique de la lumière de Minisilk FT peut être divisée en trois impulsions: une caractéristique indispensable pour éliminer facilement les poils superflus ou les taches brunes, même sur des peaux riches en mélanine. Les impulsions segmentées permettent d'utiliser des fluences bien supérieures tout en protégeant la peau de dommage thermique. Le médecin peut sélectionner la durée et l'énergie de chaque impulsion en soi: une technologie intelligente conçue pour protéger la peau du patient.


PEAU LISSE EN UN RIEN DE TEMPS

Un des avantages de la lumière pulsée est la rapidité du traitement. Ceci est encore plus évident dans le cas de Minisilk FT dont la pièce à main a une large surface d'émission, d'ailleurs une des plus larges sur le marché. Le résultat est une vitesse de traitement plus rapide, ce qui signifie facilité de l'épilation même sur des surfaces étendues comme la poitrine, les jambes ou le dos, rapidité et sûreté de l'opération.

Une épilation progressive avec Minisilk FT sur chaque type de poil, peau et phototype est un traitement indolore et durable qui réduit le nombre de séances et ralentit la nouvelle croissance des poils.



Coll. de: Dr. G. Cannarozzo - Dr. P. Bonan
Dr. P. Campolmi - Florence, Italie.

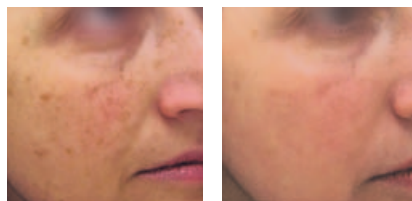

Coll. de A. Pulvirenti - Catane, Italie.

ACTION CIBLÉE SUR LES IMPERFECTIONS DE LA PEAU

Des lésions pigmentaires, des lésions vasculaires superficielles, la couperose, la rosacée, des pores dilatés, l'acné, des taches de vieillissement: Minisilk FT agit sur une série d'imperfections sur tout le corps sans effets nuisibles, même sur des zones plus délicates comme le visage, la nuque et la gorge. Des améliorations sont déjà visible après quatre ou cinq séances et deviennent de plus en plus évidentes au cours des mois qui suivent.

EFFET LIFTING MINI-INVASIF AVEC RÉCUPÉRATION RAPIDE

Des résultats esthétiques significatifs seront de suite visibles après un cycle variable de séances. Du fait de sa vitesse et de sa précision, Minisilk FT donne à la peau un effet lifting général sans signe de traumatisme ni de scalpel avec des temps de récupération très courts. La lumière pulsée stimule la production de nouveau collagène et améliore la tonicité, la texture et la luminosité de la peau.



Coll. de A. Pulvirenti - Catane, Italie.