

DEKA
Innate Ability

LE NOUVEAU **SYSTÈME PRO**

onda
PRO

**Technologie
Precision-GigaWave PGW
Extension de Coolwaves**

L'évolution du modelage facial non invasif

ONDA PRO se distingue en **Esthétique** et en **Dermatologie**



ONDA PRO

L'ÉVOLUTION DE
L'EXCELLENCE

LIFTING & REMODELAGE
DU VISAGE

RAFFERMISSEMENT DE LA
PEAU

RÉDUCTION DES GRAISSES

CELLULITE



Principes fondamentaux

Après le succès de la plateforme ONDA, DEKA a conçu une pièce à main spécifique, introduisant une nouvelle solution : PGW (Technologie Precision-GigaWave), qui permet de travailler de manière encore plus précise et sélective, étendant ainsi l'utilisation des Coolwaves® au visage de manière sûre, efficace et non invasive.

Une nouvelle pièce à main améliore les performances d'ONDA PRO : POCKET, caractérisée par une profondeur d'action spéciale qui permet un raffermissment et un lifting spécifiques. ONDA PRO est la nouvelle et seule technologie révolutionnaire pour le remodelage et le remodelage du visage.

La triple action d'ONDA PRO:

Lifting


Grâce à sa technologie PGW exclusive, les Coolwaves d'ONDA PRO sont encore plus sélectives et produisent un fort effet d'étirement sur le visage, créant ainsi un puissant effet de lifting.

Raffermissment

L'action en profondeur dans le derme produit une rétraction immédiate des fibres de collagène et la production de nouveau collagène rend les tissus compacts et toniques.

Cellulite et réduction des graisses

Les ondes froides et la technologie PWG détruisent en profondeur les membranes des cellules adipeuses sous-cutanées. Le résultat est un remodelage précis du corps et du visage.

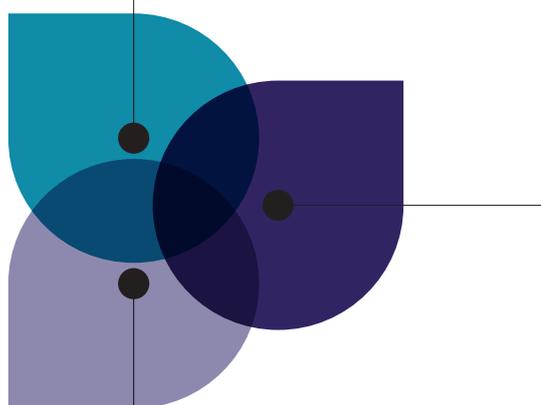



LA SCIENCE À L'ŒUVRE

Pièce à main Pocket:

Conception ergonomique pour optimiser l'efficacité sur les zones du visage



Précision absolue

Les pièces à main sont spécialement conçues pour émettre des **Coolwaves®** de manière contrôlée. Grâce à la nouvelle technologie PGW, l'énergie se concentre uniquement là où elle est nécessaire (en fonction de la profondeur de l'action de la pièce à main) et **les tissus environnants sont totalement préservés.**

Différentes profondeurs de pénétration pour différentes indications d'utilisation:

Les trois pièces à main, **Deep, Shallow et Pocket**, se distinguent par leur profondeur d'action. Chacune est conçue pour des zones et des applications différentes.



Pocket*

Idéale pour le **Lifting** | **Raffermisssement du visage**



Shallow*

Idéale pour la **Cellulite** | **Raffermisssement cutané** | **Réduction des graisses du visage**



Deep*

Idéale pour la **Graisse localisée**

Un système de refroidissement intégré

Un système de refroidissement de la peau par contact est intégré aux pièces à main et contrebalance la chaleur induite par les micro-ondes.

Le derme superficiel est préservé, ce qui assure un confort total au patient et minimise les effets secondaires et l'inflammation.


*Toutes les pièces à main sont optionnelles



LA SCIENCE À L'ŒUVRE

Technologie PGW et mécanisme d'action

L'énergie des micro-ondes est délivrée sur la cible : L'énergie est maintenant confinée avec plus de précision, provoquant des effets différents dans des zones sélectionnées à des profondeurs de pénétration différentes..

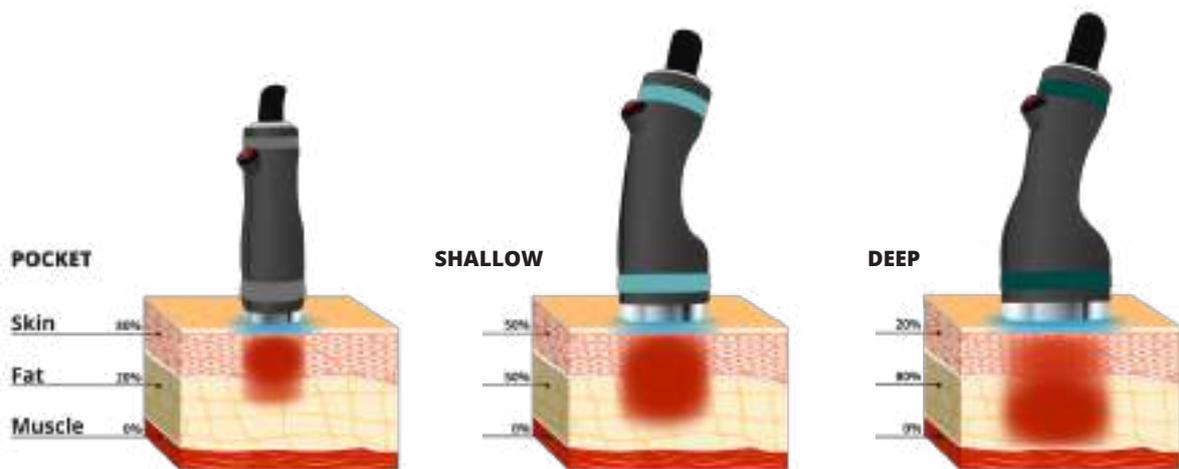

Résultats cliniques



Avec l'aimable autorisation de Neoasia (Singapour)



Avec l'aimable autorisation du Prof. Paolo Bonan, MD. Dermatologue (Italie)



Avec l'aimable autorisation du Dr Anna Claudia Butera, MD Dermatologue (Italie)



Avec l'aimable autorisation du Dr Joseph SeokBae Seo, MD Dermatologue (Corée du Sud)

PGW

Precision-GigaWave Technology

Coolwaves et la technologie PGW : les dernières avancées en matière d'esthétique

Les Coolwaves ont été introduites en 2018 en tant que première technologie au monde utilisant des micro-ondes spéciales et sûres pour le traitement des adiposités localisées, de la cellulite et de la laxité cutanée sur tout le corps, en particulier sur l'abdomen, les cuisses et les hanches : elles dissolvent les graisses, resserrent et dessinent les contours de la peau, en raffermissant les tissus.



Grâce à l'efficacité de la nouvelle technologie

PGW
(Precision-GigaWave Technology), les micro-ondes sont le traitement le plus demandé par les célébrités aux États-Unis.



La parole aux praticiens

« J'ai plus de 25 ans d'expérience dans l'utilisation de systèmes RF et d'autres dispositifs basés sur l'énergie, mais j'ai récemment découvert ONDA PRO et j'ai été impressionné par les résultats de ses ondes froides sur le visage. J'ai eu l'intuition que les micro-ondes constituaient un tournant sur le marché du visage et j'ai eu raison. J'utilise ONDA PRO pour le lifting, le raffermissment et aussi pour réduire la graisse et j'obtiens des résultats incroyables. La raison de son efficacité est la profondeur d'action correcte : Avec ONDA PRO, nous avons la possibilité d'utiliser des pièces à main avec une profondeur d'action différente (3 mm et 7 mm) en fonction du type de traitement (plus d'action sur le derme ou sur la graisse). Le résultat est un effet de lifting complet, un éclaircissement et un lissage de la peau du visage sans temps d'arrêt et avec un inconfort minimal/tolérable ».

Dr. Joseph SeokBae Seo, MD
Dermatologue (South Korea)

« Onda PRO est une nouvelle plateforme qui, à partir de son application historique dans le modelage du corps, peut maintenant être appliquée à la zone du visage. Elle est également très efficace pour les peaux tombantes et relâchées car nous pouvons exploiter ce type d'énergie - les micro-ondes spéciales - non seulement sur la graisse du visage mais aussi en interagissant avec le collagène, ce qui nous permet de personnaliser cette application en utilisant différentes pièces à main : Nous pouvons donc personnaliser cette application en utilisant différentes pièces à main : 3 mm (Pocket) et 7 mm (la plus grande pour le tissu adipeux du visage), de sorte que nous pouvons adapter ce type d'outil à tout type d'indication que nous avons : Visage plus large, peau flasque, raffermissment, véritable lifting.

Grâce à ce type d'énergie, nous n'avons pratiquement pas d'effets secondaires : c'est totalement indolore, seulement une modeste sensation de brûlure et nous n'avons aucune sorte d'érythème ou de gonflement. Nous pouvons régler plusieurs problèmes : Nous avons réduit nos interventions chirurgicales d'au moins 50 %, car nous pouvons obtenir de magnifiques liftings du visage (grande interaction avec la laxité et les fibres de collagène). L'une des caractéristiques de cette énergie, par rapport à la RF, est la lésion thermique prolongée du tissu : Les résultats sont excellents même dans les zones contiguës (paupières basses et mâchoires) car elles sont affectées par la diffusion thermique. Cela rend cette procédure unique sur le marché car nous ne disposons d'aucun autre outil capable d'obtenir ce type de résultat. En conclusion, nous pouvons dire qu'ONDA PRO - dans son application particulière au visage - peut être considéré comme une procédure emblématique dans le domaine cosmétique, et dans le processus de resserrement et de lifting du visage. Nous obtenons d'excellents résultats sans utiliser de consommables.

Prof. Paolo Bonan, MD-
Dermatologue Florence (Italy)

ONDA PRO IS SUSTAINABLE

LES SYSTÈMES ET DISPOSITIFS DEKA SONT
TOUS CONÇUS ET ASSEMBLÉS POUR
ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE : RENDRE
NOTRE CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
TRAÇABLE, TRANSPARENTE ET FIABLE.
NOUS RESPECTONS LES
NORMES ENVIRONNEMENTALES
INTERNATIONALES POUR NOUS-MÊMES ET
NOS FOURNISSEURS.

L'ACCORD PARFAIT

Les points forts d'ONDA PRO

- Les micro-ondes ONDA PRO sont plus sélectives et plus efficaces grâce à la nouvelle **technologie PGW**.
- **Coolwaves** est le tout premier traitement non invasif de réduction de la graisse et de remodelage des tissus adipeux.
- Convient à **tous les types de peau**.
- **Pas d'éviction sociale, pas d'ecchymoses**.
- **Une expérience fantastique**.
Le traitement ne fait pas mal comme les traitements chirurgicaux invasifs et douloureux.
- **Triple action sélective** basée sur différentes profondeurs d'action de la pièce à mains.
- Priorité à la **Sécurité et l'Efficacité**.
- **Pas de consommable**.



Réservé aux utilisateurs DEKA :

une aide précieuse pour la pratique médicale

DEKA Club

Nouvelle interface utilisateur

Pièces à main ergonomiques (POCKET, SHALLOW, DEEP)



Lumières LED

COOLWAVES®

TECHNOLOGIE PGW

Caractéristiques techniques

ONDA PRO	
Source	Microwaves - Coolwaves® (Technologie PGW)
Fréquence	2.45 GHz
Puissance	Jusqu'à 200 W
Pièces à main	Deep - Shallow - Pocket
Refroidissement des pièces à main	Refroidissement intégré et breveté
Contrôle des émissions	Interrupteur au doigt
Base de données	Tutoriel intégré aux protocoles de traitement
Dimensions et poids	110 (H) cm x 40 (L) x 70 (P) cm 60 Kg
Exigences électriques	100-240 Vac - 50/60 Hz - 1500 VA

Cette brochure n'est pas destinée au marché américain.



Cachet du distributeur



DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italy
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

DEKA Innate Ability

Spin-off du groupe ELEn, DEKA est un leader mondial dans la conception et la fabrication de lasers et de sources lumineuses pour des applications dans le domaine médical. DEKA commercialise ses appareils dans plus de 120 pays par l'intermédiaire d'un vaste réseau de distributeurs internationaux et de bureaux directs en Italie, en France, au Japon et aux États-Unis. L'excellence est la marque de l'expérience et de la reconnaissance que DEKA a acquises dans le domaine de la R&D en plus de trente ans d'activité. La qualité, l'innovation et l'excellence technologique placent DEKA et ses produits dans une position unique et distinguée dans l'arène mondiale. DEKA fabrique des appareils laser conformément aux spécifications de la directive 93/42/CEE et son système d'assurance qualité est conforme aux normes ISO 9001 et ISO 13485.